


Bieten Sie nur das Beste

APILUS xCell Pur

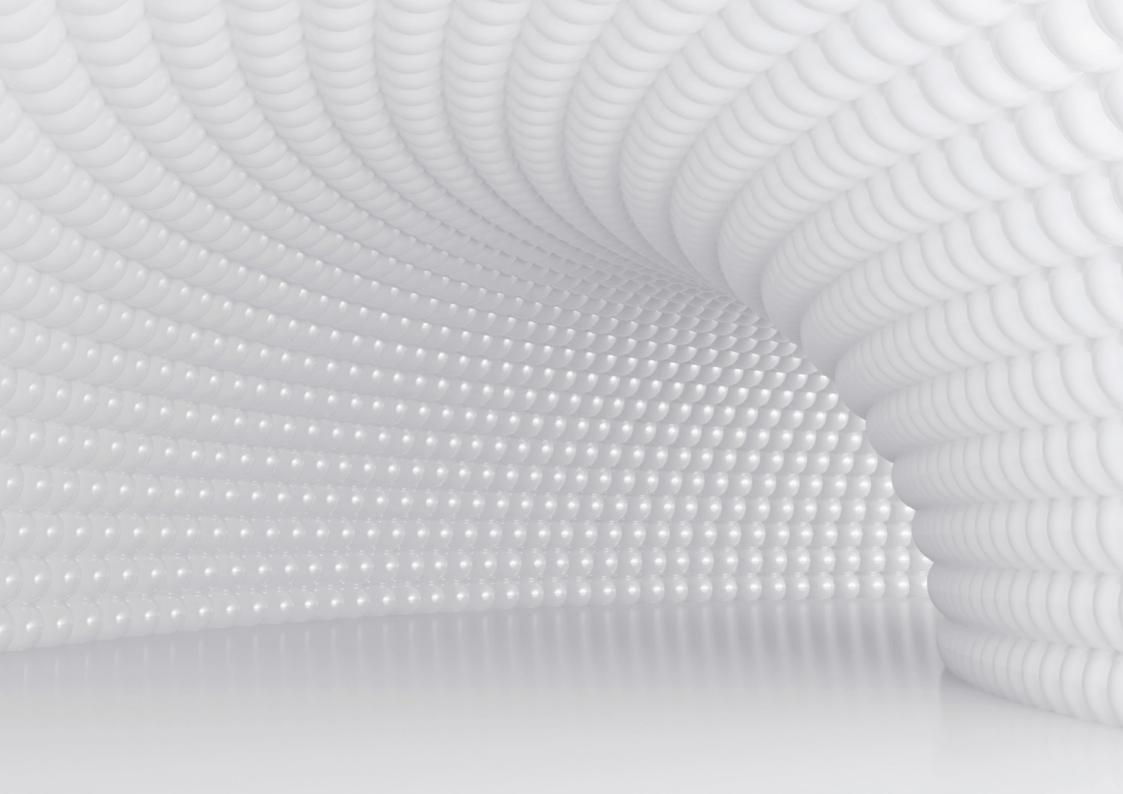

Apilus xCell- ein Meilenstein in der Haarentfernung.

Sie haben uns herausgefordert. Hier ist unsere Antwort. Mit höherer Wirksamkeit, optimierter Schnelligkeit und gesteigertem Komfort setzt *Apilus xCell* gegenüber seinen Vorgängern neue Massstäbe bei der 100 % dauerhaften Haarentfernung. Ausgereiftes Design mit Touchscreen, individuelle Behandlungsprogramme und einzigartiger 27,12-MHz-Hochfrequenzimpuls bieten eine perfekte Kombination aus Benutzerfreundlichkeit und Leistung.











Ergonomisches Flip-Top-Gehäuse

Versüssen Sie Ihren Arbeitsalltag!

Apilus xCell sucht seinesgleichen unter den Elektrolyse-Geräten. Das Gehäuse aus Aluminium ermöglichte uns, die Entwicklung eines neuen Designs mit geradlinigeren, eleganteren und ergonomischeren Formen. Dank Touchscreen und intuitiver Benutzerführung ist *Apilus xCell* besonders einfach zu bedienen.

Hochauflösender Touchscreen

Apilus xCell sorgt für Stil in Ihrem Alltag und vereinfacht Ihre Arbeit. Der Touchscreen bietet eine schnelle Ansprechzeit, hohe Auflösung und einwandfreie Sicht. Ausserdem verfügt er über satte Farben und sein Format ist einfach perfekt!

Intuitive Benutzerführung

So macht Arbeiten Spass! Die Benutzerführung von Apilus xCell ist so einfach und angenehm, dass Sie künftig nur noch mit diesem Gerät arbeiten wollen. Sie werden begeistert sein von der visuellen Benutzeroberfläche, mit der Sie alle Handgriffe problemlos und schnell ausführen können!

Ergonomisches «Flip-Top»-Gehäuse

Fortschrittliche Technologie – fortschrittliches Gehäuse. Mit seiner klappbaren Front – Flip-Top – ist *Apilus xCell* praktischer und ergonomischer denn je. Apilus xCell ist nicht nur technisch ausgereift, sondern passt sich auch, unabhängig von Ihrer Position, perfekt an Ihr Sichtfeld an.





Behandeltes Haar







27,12 MHz-Hochfrequenzimpuls im Vergleich mit 5 MHz und 13,56 MHz

13.56 MHz

Erzielte Zerstörung an einem Haarfollikel mittels 27,12 MHz-Hochfrequenzimpuls

Laut Studien des LOEX-Forschungszentrums in Quebec. Kanada

27.12 MHz

Bieten Sie Komfort und Effizienz der Extraklasse!

Dass sich die Elektrolyse heute in eine so schnelle, effiziente und angenehme Technik verwandelt hat, verdankt sie mit Sicherheit den einzigartigen 27,12-MHz-Hochfrequenzimpulsen von *Apilus*. Im neuen *Apilus xCell* erreicht diese Technologie ein neues Level – künstliche Intelligenz im Einklang mit verbesserter Leistung und höchstem Komfort.

Noch schnellere Ergebnisse

5 MHz

Mit weltweit beispielloser Technik appliziert *Apilus xCell* einen ultraschnellen 27,12-MHz-Hochfrequenzimpuls. Damit bietet *Apilus xCell* gegenüber anderen Epiliergeräten eine sechsfach schnellere Frequenz. Die Energie wird dadurch stärker auf die Haarzwiebel konzentriert, sodass sich bei allen Haartypen noch schneller dauerhafte Ergebnisse erzielen lassen.

Verbesserte Leistung

Apilus xCell ist 35 % leistungsstärker als Apilus Junior 3G und 10 % leistungsstärker als Apilus Platinum. Mit diesem Plus an Leistung wird die Koagulation noch schneller erreicht – mit deutlich mehr Komfort und Wirksamkeit.

Komfort ohne Gleichen

Mit seinen 27,12 MHz-Hochfrequenzimpulsen und exklusiven Epilationstechniken bietet *Apilus xCell* bislang unerreichten Komfort bei der dauerhaften Haarentfernung. Die Behandlung erfolgt so schnell, dass sie praktisch nicht zu spüren ist. Millisekunden genügen, um das Haar zu entfernen! Mit solch hohem Komfort ist *Apilus xCell* die beste Lösung für alle Körperregionen und auch alle Kunden – selbst die sensibelsten!



Seien auch Sie einzigartig!

Neben den bewährten Epilationstechniken *PicoFlash*, *Synchro* und *ÉvoluBlend* bietet *Apilus xCell* zwei neue Epilationsmodi: *MéloFlash* und *SynchroBlend*. In Kombination mit speziell für Damen und Herren optimierten neuen Programmen sind diese exklusiven Techniken Ihre wichtigsten Verbündeten bei der Erzielung einer 100 % definitiven Haarentfernung in Rekordzeit!

PicoFlash

Aufgrund ihrer aussergewöhnlichen Schnelligkeit ermöglicht die *PicoFlash-Thermolysetechnik* eine punktgenaue Koagulation an der Haarzwiebel und verhindert die Wärmeausbreitung im benachbarten Gewebe. Gezielt zerstört sie die

ten Gewebe. Gezielt zerstört sie die für das Nachwachsen der Haare verantwortlichen Zellen (alle Haartypen) und bietet ein Mass an Komfort, das Ihre Kunden zu schätzen wissen werden.

Synchro (patentiert)

Die Synchro-Technik bietet nie da gewesene Wirksamkeit selbst bei schwierigen und/oder tiefliegenden Haaren. Für eine nachhaltige Zerstörung aller Keimzellen werden gleichzeitig mehrere

Picoimpulse von je 2 bis 5 Millisekunden appliziert, die durch einen kurzen Intervall zur thermischen Relaxation unterbrochen werden. Bei dieser Thermolysetechnik muss die Nadel von der Haarzwiebel zum Ringwulst bewegt werden. Ausserdem sind isolierte Nadeln zu verwenden.

MultiPlex

Die MultiPlex-Technik vereint die langsame Thermolyse mit einem schnellen PicoFlash-Impuls. Die langsame Thermolyse bewirkt im Follikel eine leichte Erwärmung, die dessen Porosität und damit auch die Wirksamkeit des PicoFlash-Impulses erhöht. Sie ermöglicht

Impulses erhöht. Sie ermöglicht eine nachhaltige Zerstörung und ist ideal für schwierige oder leicht deformierte Haare.

MéloFlash

MéloFlash ist eine Thermolysetechnik, die im Hundertstelsekundenbereich arbeitet. Da die Impulszeit länger und die Intensität schwächer ausfällt, breitet sich die erzeugte Hitze grossflächiger im Follikel aus. Für kräftige, tief sitzende oder trockene Haare ist diese Technik die ideale Lösung.

SynchroBlend

Bei der *SynchroBlend*-Technik wird ein galvanischer Strom appliziert, der von mehreren Picoimpulsen überlagert wird, die durch einen Intervall zur thermischen Belaxation unter-

brochen werden. Diese für hartnäckige und deformierte Anagenhaare entwickelte Technik kann mit einer Bewegung von der Haarzwiebel zum Ringwulst und zurück einhergehen. Es sind isolierte IsoBlend-Nadeln zu verwenden.

ÉvoluBlend

Die ÉvoluBlend-Technik unterscheidet sich durch Applikation eines galvanischen Stroms, der ab 0 mA schrittweise bis zu einer der Toleranzschwelle Ihres Kunden entsprechenden Intensität erhöht

wird. Gleichzeitig wird ein Thermolysestrom mit 27,12 MHz appliziert, der auch bei besonders widerspenstigen Haaren eine wirksame und angenehme Behandlung gewährleistet.

*Sämtliche Apilus xCell-Techniken finden Sie im Überblick in der Tabelle am Ende dieser Broschüre.





Profitieren Sie von künstlicher Intelligenz!

Apilus xCell ist mit künstlicher Intelligenz ausgestattet. Apilus xCell denkt für Sie, lässt Ihnen aber gleichzeitig auch die Freiheit, individuell auf Ihren Kunden abgestimmte Einstellungen zu treffen und die Parameter entsprechend zu ändern. Wählen Sie das Geschlecht Ihres Kunden, die zu behandelnde Körperregion, die Haargrösse und die verwendete Nadel, und schon bietet Ihnen Apilus xCell die geeignete Behandlungsmethode an. Für aussergewöhnlichen Komfort und optimale Wirksamkeit gleicht das Gerät ausserdem die Ströme unter Berücksichtigung des Feuchtigkeitsgehalts der betreffenden Körperregion aus.

Intelligente Programme

Apilus xCell bietet ein Komplettpaket von Behandlungsprogrammen, die sich ganz nach Körperregion, Haartyp und sogar Geschlecht des Kunden richten. Wirksamkeit, Sicherheit und Komfort garantiert!

Schrittweise einstellbarer galvanischer Strom

Durch den neu konzipierten galvanischen Stromkreis werden Änderungen der Intensität aufgefangen, um bei Blend- und Kataphorese-Behandlungen oder anderen kosmetischen Treatments optimalen Komfort zu gewährleisten.

APIL-Funktion

Mithilfe der APIL-Funktion werden die Programme je nach Typ und Grösse der verwendeten Nadel neu kalibriert. Sie verfügen somit über sehr genaue Einstellungen, die Hautreaktionen auf ein Minimum reduzieren.

Automatische Anpassungen

Der Stromkreis von Apilus xCell stimmt die Intensität des Stroms automatisch auf den Feuchtigkeitsgehalt der behandelten Körperregion ab und ermöglicht somit deutlich verbesserten Komfort.





Vertrauen Sie auf sichere Technik!

Der sanfte Weg zur dauerhaften Haarentfernung! Das verspricht *Apilus*. Höchstmögliche Sicherheit liegt Ihnen genauso am Herzen wie uns? Dann werden Sie die zahlreichen Hilfsmittel, die speziell für den Komfort Ihrer Kunden entwickelt wurden, zu schätzen wissen. Sorgenfreies Arbeiten für Sie, angenehme Behandlung für Ihren Kunden.

Stabilitätssteuerung


Der einzigartige Stromsteuerkreis MP/XCL-25 der *Apilus*-Technologie gewährleistet aussergewöhnliche Stabilität. Ausserdem moduliert er systematisch die Stromintensität je nach Hautwiderstand der behandelten Körperregion.

Watch-Dog XCL

Das System Watch-Dog XCL überwacht ständig die Aktivität des Steuerkreises und schaltet bei Störungen alle Ausgangsströme ab. Ein höchst ausgefeilter doppelter Mikroprozessor sorgt zudem dafür, dass es während der Behandlung nicht zu softwarebedingten Interferenzen kommt.

Gehäuse aus Aluminium-Kompositmaterial

Aus robustem Aluminium-Kompositmaterial gefertigt entspricht *Apilus xCell* den strengsten medizinischen Standards in Bezug auf Frequenzabstrahlungen. Nachhaltig, umweltfreundlich und sicher!

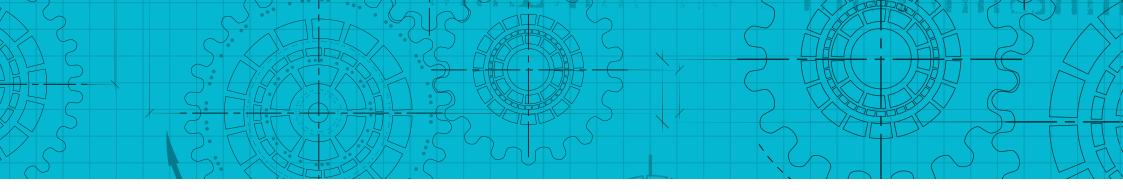

Unsere Qualität zu Ihren Diensten.

Apilus-Anwender verdienen nur das Beste! Deshalb sind wir überzeugt, dass das perfekte Erlebnis des Kunden nicht allein auf der Entwicklung und Fertigung ausgezeichneter Geräte zur dauerhaften Haarentfernung beruht. Jedes von uns verkaufte Elektrolysegerät bietet Ihnen die Sicherheit der Apilus-Vorteile und damit das umfassendste Leistungspaket, das Sie sich vorstellen können. Mit beispielloser Gewährleistung, engagiertem Kundendienst und vielfältigem Marketingsupport stehen wir Ihnen von A bis Z zur Seite – für ein rundum zufriedenstellendes Apilus-Erlebnis.

Apilus-Garantie

Die Apilus-Geräte werden nach höchsten Industriestandards gefertigt. Dafür bieten wir Ihnen ab Kaufdatum vierundzwanzig (24) Monate Garantie gegen Fabrikationsund Materialmängel, einschliesslich der Kosten für Ersatzteile und Arbeitszeit.

Kundendienst

Sie haben Fragen? Wir sind für Sie da! Sie brauchen Unterstützung bei der Bedienung eines Programms? Unsere zuvorkommenden Mitarbeiter helfen Ihnen sehr gerne weiter.

Marketingtools


Starten Sie mit *Apilus* voll durch! Benötigen Sie Broschüren oder Poster für Ihr Institut, Fotos für Ihre Internetpräsenz? Sprechen Sie uns an. Wir stellen Ihnen eine Vielzahl von Marketingtools zur Verfügung. Denn auf Ihren Erfolg sind wir stolz!

Fachschulungen

Werden Sie Profi im Umgang mit unseren Geräten! Ihre Ausbildung liegt uns am Herzen. Deshalb liefern wir mit jedem Apilus-Gerät die passende Anwenderschulung. Die Ausbilderinnen der Apilus-Akademie sind Spezialistinnen auf ihrem Gebiet. Gern stellen sie Ihnen die Programme und Zubehörteile vor und erläutern Ihnen, wie Sie das Meiste aus Ihrer Investition herausholen.

Technischer Support

Die Apilus-Techniker verfügen über die notwendigen Kenntnisse und die Erfahrung, um Sie bei der Leistungserhaltung Ihres Geräts zu unterstützen. Im Störungsfall genügt ein Anruf, damit Ihr Gerät wieder mit optimaler Leistung arbeitet und Sie sorgenfrei Ihrer Tätigkeit nachgehen können.

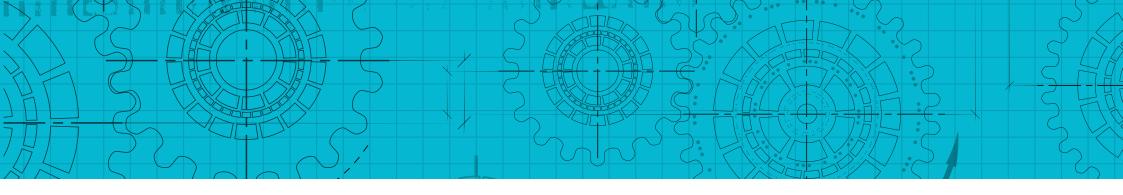

Technische Spezifikationen und Zubehör.

Modalitäten Thermolyse PicoFlash MeloFlash MultiPlex Thermokoagulation Synchro Blend

PicoBlend	•
OmniBlend	•
MultiBlend	•
EvoluBlend	0
SynchroBlend	0

Cata Ion +	•
Cata Ion –	•

Nach-/Kosmetikbehandlungen

Programme	
Individuelle Anpassung	
22 Körperregionen (11 beim Mann – 11 bei der Frau)	•
10 Haardicken	•
3 Nadeltypen (Edelstahl, ITH, JBL)	•
5 Nadelgrössen	•
Behandlungsstatistiken	einfach
Externer LISR-Port für Daten-Undate und "wiederherstellung	

Zubehör	
2 Nadelhalter (1 kurz und 1 normal)	•
1 rotes Kabel und 1 schwarzes Kabel	•
1 Stabelektrode und 1 Plattenelektrode	•
1 Gruppe aus 4 Multifunktionselektroden	•
1 Fusspedal	•
1 USB-Stick und 1 Eingabestift	•
1 Benutzerhandbuch	•

Sonstige Eigenschaften		
Funktionen		
Prüfung der Hautfeuchtigkeit, Zubehörtest und Toleranztest bei der Blend-Behandlung	•	
Anzeige U.L. und E.L.	•	
Modus ohne Pedal	•	
2 Ausgänge für Nadelhalter	•	
Elektronik		
Exklusive 27,12MHz-Hochfrequenzimpulse	•	
Ansprechzeit in Millisekunden	•	
Schrittweise einstellbarer galvanischer Strom	•	
Automatischer Ausgleich je nach Feuchtigkeitsgehalt	•	
Mikroprozessor MP/XCL-25	•	
Sicherheitssystem Watch-Dog XCL	•	
Entspricht den internationalen Normen	•	
Universelles Netzteil	•	
Design		
Farb-Touchscreen und einfache Benutzerführung	•	
Ergonomisches «Flip-Top»-Gehäuse aus Aluminium	•	
Zubehörhalterungen	•	

APILUS XCell Pur



Jean Pierre Rosselet Cosmetics AG DE-28307 Bremen, Germany I CH-8034 Zürich, Switzerland